

Peroneustuki Free Step FS 30 ja FS 32

Tuotenro FS 30

FS 30 on ortopedinen apuväline ja se on tarkoitettu käytettäväksi auttamaan heikentynyttä nilkan dorsiflexiota. Laitteen aktiivi-nen/liikkuva osa on joustava lateksinen kuminauha, joka edesauttaa jalkaterän nostamista ja/tai pitämistä ylöspäin suuntautuvassa asennossa. Free Step mahdollistaa normaalinoloisen liikkumisen diskreetisti; laite on käytössä huomaamaton, kevyt ja kaikin puolin miellyttävä.

Free Step-laitteet täyttävät Ruotsin Terveysturvaviraston määräykset SOSFS 1994.20 (M), lääketieteelliset laitteet luokka 1 ja on CE-hyväksytty. Suomessa Free Step-tuotteiden käyttäjiä ovat mm. Turun Yliopistollinen Keskussairaala ja Turun Kaupungin-sairaala. Tuotteen mahdollisissa huoltoasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä laitteen myyjäliikkeeseen, tai maahantuajaan.

LAITTEEN OSAT

FS30 kuuluu seuraavat osat: nilkkamansetti (2-osainen, nahkaa, tarrasuljin), D-rengas (nailonia), lateksinen kuminauha, teräskoukkuja (RST).

LAITTEEN ASENNUS

Laitteen nilkkamansetti kiinnitetään sukan päälle (ei mielellään paljaalle iholle) ja kiristetään tarranauhalla sopivan tiukaksi. Lateksinen kuminauha kiinnitetään D-renkaaseen ja toisesta päästä kengän nauhoihin kiinnitettyihin teräksisiin kiinnityskoukkuihin (ks. kuva).



Kuminauhan etäisyys teräskoukuista määrittää FS30:n jalkaterän nostovoiman – sopiva kireys löytyy kokeilemalla teräskoukkuja eri nauhareikiin (kiinnitys enemmän kengän kärkeä kohti voimistaa nostetta).

Tuotenro FS 32

FS 32 on ortopedinen apuväline ja se on tarkoitettu käytettäväksi FS30-laitteen kanssa. Laite on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa.

LAITTEEN OSAT

FS 32-laitteeseen kuuluu seuraavat osat: jalkaterämansetti (2-osainen, nahkaa, tarrasuljin), kiinnityskoukkuja (muovia).



LAITTEEN ASENNUS

Laitteen jalkaterämansetti kiinnitetään sukan päälle (ei paljaalle iholle) ja kiristetään tarranauhalla sopivan tiukaksi. Lateksinen kuminauha kiinnitetään FS30-laitteen D-renkaaseen ja toisesta päästä jalkaterämansettiin kiinnitettyihin muovisiin kiinnityskoukkuihin (ks. kuva). Jalkaterämansettia siirtämällä voidaan säätää nostovoimaa.

TAKUU JA EDUSTAJATIEDOT

Laitteiden valmistuttaja Lake Trading HB (Högstrågvägen 2, S-17835 Ekerö) myöntää laitteelle kolmen (3) kuukauden rajoittamat-toman takuun, edellytyksenä on laitteen ohjeidenmukainen käyttö (esim. kuminauhaa ei saa venyttää tarpeettomasti).

